

FRASCO TRAMPA SUCCIÓN



DESCRIPCIÓN:

Los frascos trampa reutilizables **GENTEC**, están diseñados para uso con sistemas de vacío tipo NFPA 99 que utilizan reguladores de succión. Se usan para evitar la contaminación de la red con pus, coágulos de sangre, flema y exceso de líquidos producidos por un paciente. Se fabrican para larga duración, son esterilizables mediante baño desinfectante o en autoclave (Máximo 132°C / 10 Minutos). **El fabricante garantiza un mínimo de 30 ciclos de tratamiento térmico en autoclave**, de acuerdo con las condiciones de trabajo descritas en el manual de uso.


CARACTERÍSTICAS:

Los frascos trampa reutilizables **GENTEC**, están diseñados para ser instalados en el acople DISS Macho ubicado en la parte inferior del regulador de succión. La tapa metálica incluye un pitorro para facilitar la conexión de la manguera de succión. La jarra del frasco trampa está fabricado en policarbonato de alta durabilidad y la tapa en aluminio anodizado. El diseño innovador del flotador plástico permite un cierre fácil con el objetivo de evitar el desbordamiento de los fluidos hacia el regulador de succión y la red. La tapa y el frasco se sellan mediante una junta a prueba de fugas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo	Volumen	Temperatura	Humedad	Presión	Vida Útil
880VT-7	350 ml	132° C	80 %	14.5 PSI	3 Años

ESQUEMA INSTALACIÓN:

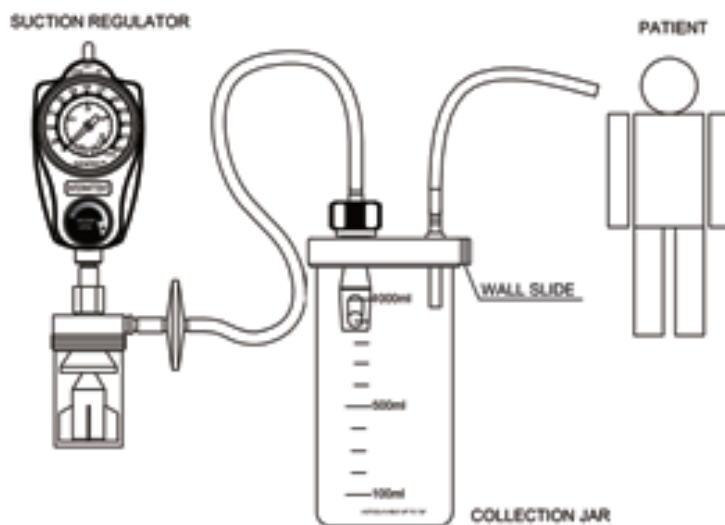

ESTERILIZACIÓN:

- Desensamble todas las partes y use esterilizante para limpiarlas. Luego introduzca en autoclave o baño desinfectante para exterminar todo contaminante o bacteria. Se recomienda esterilización en autoclave a una temperatura máxima de 132°C / 10 minutos.
- Después de la esterilización, ponga las partes en una secadora, en un ambiente bien ventilado.
- Cuidadosamente lave y esterilice la tapa, las obstrucciones en las conexiones de vacío pueden disminuir la eficiencia del equipo.

ALMACENAMIENTO:

Después de la esterilización, ensamble las partes de la tapa. Colóquela con el frasco trampa y el empaque dentro de una bolsa limpia. Almacene en un lugar seco y bien ventilado.

ADVERTENCIAS:

- La tapa y la jarra deben estar separadas antes de la esterilización.
- Use esterilizantes suaves, NO USE esterilizantes que contengan sustancias orgánicas.
- Use una esponja suave para limpiar la superficie, NO USE cepillo.
- Sea cuidadoso para no dañar el producto mientras es usado o transportado.
- NO almacene o use el frasco trampa cuando la radiación UV está presente.

GARANTÍA:

Este producto tiene un (1) año de garantía por defectos de materiales, fabricación y funcionamiento desde el día de su venta. El frasco trampa puede ser devuelto para reparación gratuita si no funciona adecuadamente, asumiendo que este fue usado bajo condiciones estándares de trabajo y que el usuario siguió los procedimientos descritos en el manual anexo. Por tanto, se excluyen las garantías por mal uso del dispositivo.